

Désensibilisant pour dents hypersensibles

MS Coat F

Stoppe l'hypersensibilité dentinaire

Excellente résistance aux acides

Très facile à utiliser

77% d'efficacité à 3 ans
Évite la sensibilité
lors du blanchiment de l'émail





MS Coat F est un agent de scellement des tubuli dentinaires contenant du Fluor pour traiter les dents hypersensibles.

La fonction du Polymère MS

MS Coat F réagit chimiquement avec les tissus durs de la dent et forme une barrière qui obture les tubuli dentinaires et stoppe toute stimulation thermique, mécanique, chimique des odontoblastes.

MS COAT F stoppe la sensibilité douloureuse immédiatement.

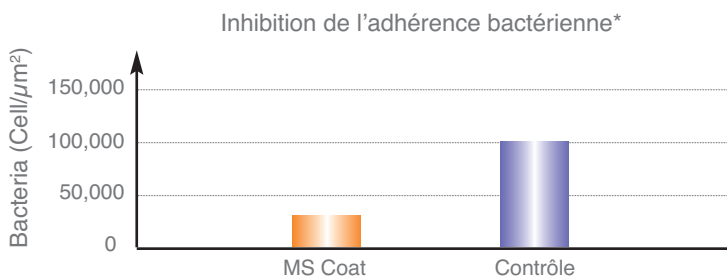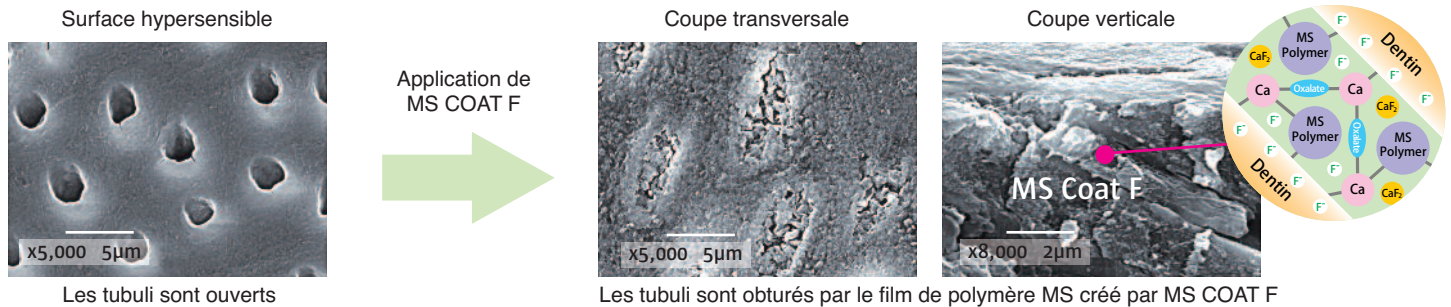


* Konishi N, Ohta Y, Takatsuka T, Inoue K: "Initial Adherence of Oral Streptococci to Dentin Surface Treated with Desensitizing Coat Agent", Jpn Conserv Dent 43, 540-546, 2000

Cette étude montre
que les colonies bactériennes
se forment moins facilement
sur une surface traitée au MS COAT F.

La fonction du Fluor

La concentration en fluor du MS COAT F est d'environ 3000 ppm. Le fluorure augmente l'effet anti déminéralisation du polymère MS.

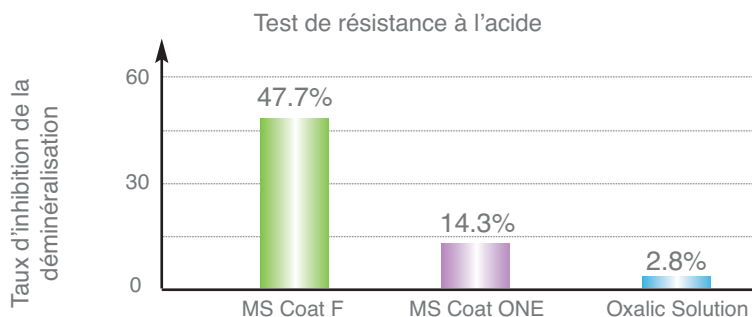

Les spécimens sont traités par différents désensibilisants puis plongés 30 mn dans de l'acide lactique.

Grâce au fluorure
et à la couche de polymère MS,
la déminéralisation est fortement réduite.

Dispositif médical (DM) de Classe IIa, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement avant l'utilisation le mode d'emploi et l'étiquetage

Organisme certificateur : TÜV SÜD Product Service GmbH

Le coffret MS Coat F contient :
Flacon 5 ml
Applicateurs spéciaux Feutre 100
Manche applicateur 1
Godets de mélange plastique 20 pc